

Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.



Natrium Citricum 3,13%

Σύνθεση:

100 ml διαλύματος περιέχουν:
 κιτρικό νάτριο 2 H₂O 3,13 g ± 2,79 g, κιτρικό νάτριο ελεύθερο H₂O σε ύδωρ για ενέσιμα ± 3,13 % κατά Ph. Eur. και 3,8 % κατά Erg.-B6.
 Χωρίς συντηρητικά.

Χρήση:

Διάλυμα για την αποτροπή της πήξης του αίματος σε περιπτώσεις οζονοθεραπείας και θεραπειών HOT και UVB με αυτόλογο αίμα. Για ασφαλή και αποτελεσματική διατήρηση της βατότητας του καθετήρα σε διαδικασίες κάθαρσης. Αναστολή της πήξης για διαγνωστικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων και για τη διάγνωση in vitro. Οι αμπούλες προορίζονται για μία χρήση.
 Η επαναχρησιμοποίηση των αμποουλών ενέχει πιθανό κίνδυνο για τον ασθενή ή κίνδυνο μόλυνσης για τον χρήστη. Η επιμόλυνση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς.
 Τυχόν επεξεργασία αποκατάστασης/καθαρισμού μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Σημείωση:

Το προϊόν επιδεικνύει ωσμωριακότητα κατ' όγκο από περίπου 290 mosmol/l έως 300 mosmol/l. Πληροί το απαιτούμενο εύρος. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τα αιμοκύτταρα και τον ανθρώπινο οργανισμό. Το διάλυμα είναι στείρο και ελεύθερο ενδοτοξινών.
 Μετά την απομάκρυνση του συνδυαστικού καπακιού από τη φιάλη και πριν το τρύπημα, πάντοτε να απολυμαίνετε το ελαστικό πώμα με ένα κατάλληλο απολυμαντικό προϊόν με αλκοόλη. Ανοίξτε την αμπούλα με τον κατάλληλο τρόπο, τοποθετώντας τον αντίχειρα στο προβλεπόμενο σημείο θραύσης και σπάζοντας με πλευρικές κινήσεις την κεφαλή της αμπούλας. Τραυματισμοί με τη βελόνα θα πρέπει να αποφεύγονται.
 Χρησιμοποιήστε το μόνο εφόσον το διάλυμα είναι διαυγές, ο περιέκτης είναι άθικτος και η ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει. Όσον αφορά τις αμπούλες, οι σπασμένοι περιέκτες θα πρέπει να απορρίπτονται, και όσον αφορά τις φιάλες, μετά το άνοιγμα φυλάσσετε στην ψύξη, σε θερμοκρασία 2 °C έως 8 °C.
 Κατά τα άλλα, φυλάσσετε τους περιέκτες μακριά από το φως και σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 15 °C έως 25 °C). Φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
 Μικρές ποσότητες μπορούν να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα χωρίς κίνδυνο για το περιβάλλον. Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης της εκάστοτε θεραπείας.

Μεγέθη συσκευασιών:

Συσκευασίες με	10 αμπούλες των 10 ml
Συσκευασίες με	100 αμπούλες των 10 ml
Συσκευασίες με	20 φιάλες έγχυσης των 100 ml

Τελευταία ενημέρωση:

Ιανουάριος 2024